

Checkliste:

Vorbereitung & Material

Prüfpunkte vor Beginn

- Arbeitsfläche desinfiziert
- Testkassette, Reader, Adapter bereitgelegt
- Batterien geprüft / USB angeschlossen
- Handschuhe angezogen
- Einverständniserklärung unterzeichnet
- Timer bereitgestellt
- Testperson über Ablauf informiert

Erledigt

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Durchführung

Prüfpunkte während des Tests

- Fingerbeere desinfiziert, Einwirkzeit beachtet
- Ersten Blutstropfen verworfen
- Kapillare blasenfrei gefüllt
- Unisampler fest verschlossen und geschwenkt
- 3 Tropfen korrekt aufgetragen
- 15 Minuten Reaktionszeit gestartet
- Kassette ruhig gelagert
- Ergebnis nach Ablauf im Reader ausgewertet

Erledigt

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Nachbereitung & Dokumentation

Prüfpunkte nach Abschluss

Materialien entsorgt

Reader gereinigt

Ergebnis protokolliert

Kunde aufgeklärt

Formular abgelegt

Schulungsnachweis aktualisiert

Erledigt

☐☐☐☐☐☐